

MED  **EL**



Samba Audioprozessor

Quick Guide

VAW52104_2.0 (German)




Der Samba Quick Guide ist dazu gedacht, Ihnen einfach zu verwendende Hinweise zu den häufigsten Themen der Handhabung des Samba Audioprozessors zu geben. Sie können ihn aufgrund des kompakten Formats einfach immer bei sich tragen.

Für detaillierte Informationen zum bestimmungsgemäßen Gebrauch, den Indikationen, den Gegenanzeigen, den Warnhinweisen und den Vorsichtsmaßnahmen für den Samba oder für die vollständigen Informationen zur Fernbedienung, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung des Samba.

Inhaltsverzeichnis

Samba Audioprozessor	2
Batteriewechsel.....	3
Wechseln des Covers.....	4
Verwenden der Haarklammer.....	5
Fernbedienung	6
Siemens miniTek.....	9
Batterien.....	10
Pflege des Samba Audioprozessors.....	11
Fehlerbehebung.....	14

Samba Audioprozessor

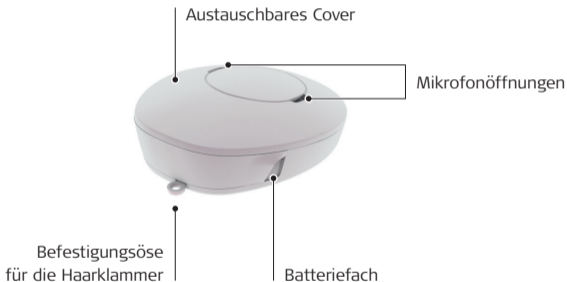


Batteriewechsel



- 1** Halten Sie den Samba zwischen Ihren Fingern. Öffnen Sie zuerst eine Seite des Batteriefachs, dann die andere Seite.



- 2** Öffnen Sie das Batteriefach bis die Batterie vollständig sichtbar ist. Drehen Sie den Samba vorsichtig um, damit die Batterie herausfallen kann.

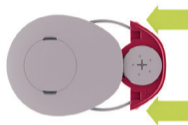


- 3** Nehmen Sie eine neue Batterie und entfernen Sie die Schutzfolie. Legen Sie die Batterie in das Batteriefach des Audioprozessors. Schieben Sie das Batteriefach in den Audioprozessor.


Wechseln des Covers



- 1 Entfernen Sie die Batterie (siehe Seite 3). Legen Sie den Samba auf eine ebene Fläche (z. B. einen Tisch) und legen Sie einen Finger auf die Oberseite (a). Lösen Sie zuerst eine Seite des Covers (b) und anschließend die andere Seite (c).

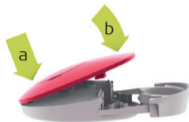


- 2 Entfernen Sie das Cover komplett und legen Sie das neue Cover auf den Samba. Drücken Sie es nach unten, erst auf der hinteren Seite (a), dann auf der vorderen Seite (b). Legen Sie die Batterie ein (siehe Seite 3).

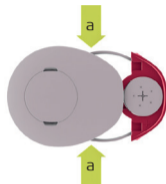


- 3 Drücken Sie die Seitenknapp unterhalb des Covers und hinter dem geöffneten Batteriefach zusammen (a), um sicherzustellen, dass das Cover richtig platziert ist. Schließen Sie das Batteriefach.

Verwenden der Haarklammer

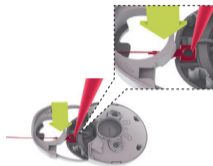

- 1** Entfernen Sie die Batterie und das Cover Ihres Audioprozessors (siehe Seiten 3 und 4). Führen Sie die Befestigungsöse unter dem Batteriefach durch.
- 2** Legen Sie die Befestigungsöse in die kleine Ausnehmung unter dem Batteriefach. Drücken Sie die Befestigungsöse mit einem kleinen, spitzen Objekt nach unten.
- 3** Legen Sie die Batterie ein und setzen Sie das Cover auf (siehe Seiten 3 und 4). Schließen Sie das Batteriefach.

Fernbedienung

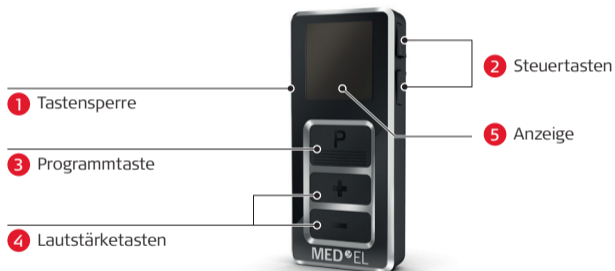

1 **Tastensperre**

Um unabsichtliches Drücken der Tasten zu vermeiden, wenn Ihre Fernbedienung in einer Tasche ist, schieben Sie die Tastensperre in die Verriegelungsposition (roter Balken sichtbar).

2 **Steuertasten**

Die Steuertasten auf der rechten Seite der Fernbedienung ermöglichen Ihnen den schnellen Zugriff auf zwei Funktionen.



Hörsysteme ein- oder ausschalten (stummschalten).



Standardlautstärke und Standardaudioprogramm wiederherstellen

3 **Programmtaste**

Drücken Sie die Programmtaste, um zum nächsten Audioprogramm zu wechseln. Bei Verwendung von zwei Hörsystemen wird das Audioprogramm bei beiden Geräten eingestellt.


4 **Lautstärketasten**

Drücken Sie die Tasten Lauter oder Leiser, um die Lautstärke stufenweise einzustellen.

Bei Verwendung von zwei Hörsystemen, wird die Lautstärke bei beiden Geräten gleichzeitig eingestellt.

5 Anzeige

Alle mit der Fernbedienung durchgeführten Aktionen werden unmittelbar am Display angezeigt.

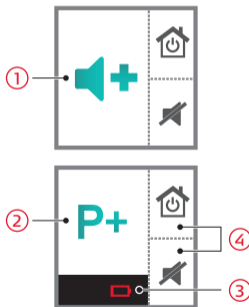

- ① Zeigt Änderung der Lautstärke an
- ② Zeigt Änderung des Audioprogramms an
- ③ Batterien der Fernbedienung sind schwach
- ④ Funktion der Steuertasten

Siemens miniTek



Alternative Fernbedienung

Drahtlose Verbindungen des Samba sind über die separat erhältliche Siemens miniTek möglich*.

Weitere Informationen zur miniTek finden Sie in der dazugehörigen Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung wird vom Hersteller der jeweiligen Fernbedienung zur Verfügung gestellt.

* Drahtlose Verbindungen sind über die separat erhältliche Siemens miniTek möglich. Sivantos ist für den Betrieb mit dem Samba oder die Übereinstimmung mit Sicherheits- und regulatorischen Bestimmungen bei Verwendung mit dem Samba nicht verantwortlich.

Batterien

Samba Audioprozessor: eine 675 Zink-Luft-Batterie

Abhängig vom gewählten Programm, der Umgebung und der Nutzungsdauer, hält die Batterie ungefähr drei Tage. Wechseln Sie die Batterie regelmäßig oder wenn der Klangpegel deutlich abfällt. Die Batterie ist schwach und muss gewechselt werden, wenn Sie eine Reihe von Signaltönen hören.



Fernbedienung: zwei AAA-Batterien

Wenn die Batterien der Fernbedienung schwach sind, wird dies in der Statusleiste angezeigt.

Pflege des Samba Audioprozessors

Folgen Sie diesen grundlegenden, jedoch wichtigen Pflegeanleitungen, um einen einwandfreien Betrieb Ihres Samba Audioprozessors zu gewährleisten.

Reinigung

MED-EL empfiehlt eine wöchentliche Reinigung des Samba aus hygienischen Gründen. Reinigen Sie nur die Außenseite des Geräts. Der Samba darf keinesfalls in oder unter Wasser gereinigt werden. Reinigen Sie Ihren Audioprozessor vorsichtig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie gegebenenfalls eine nicht scheuernde Haushaltsseife zusammen mit einem feuchten Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel.

Lagerung

Bewahren Sie den Samba im mitgelieferten Samba-Etui auf, wenn Sie ihn nicht verwenden. Zur Lagerung können Sie die Batterie aus dem Samba entfernen oder einfach das Batteriefach öffnen, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

Kontakt mit Wasser

Achten Sie darauf, dass kein Wasser über die Mikrofonöffnungen oder das Batteriefach in den Samba gelangt.

Trocknung

Wenn Sie in einem feuchten Klima leben oder zu starker Schweißbildung neigen, sollten Sie den Audioprozessor nicht im Samba-Etui, sondern in einem Trockenbehälter aufbewahren, wenn Sie ihn nicht tragen.

Sonneneinstrahlung

Bewahren Sie den Samba trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf.

Lesen Sie Ihre Gebrauchsanweisung für weitere Informationen zur Reinigung, Lagerung, Handhabung und Entsorgung des Samba Audioprozessors und für Anweisungen zur Wartung der Fernbedienung.

Fehlerbehebung

Falls Sie auf kleinere technische Probleme stoßen, folgen Sie den folgenden Schritten sorgfältig, um mögliche Ursachen und Lösungen zu identifizieren.

- 1 Prüfen Sie die Polarität der Batterie. Die flache Seite (+) muss oben sein.
- 2 Prüfen Sie, ob die Batterie leer ist und ersetzt werden muss.
- 3 Überprüfen Sie den Audioprozessor auf Verunreinigungen oder Anzeichen von Beschädigungen. Reinigen Sie vorsichtig alle Teile des Prozessors, die schmutzig sind, und trocknen Sie ihn nach der Reinigung vorsichtig ab. Falls ein Teil defekt zu sein scheint, kontaktieren Sie Ihre MED-EL Vertretung.
- 4 Sie finden detaillierte Informationen zur Fehlerbehebung in Ihrer Gebrauchsanweisung für den Samba.
- 5 Wenden Sie sich an Ihren Audiologen/ Hörgeräteakustiker und/oder Ihre MED-EL Vertretung.

© 2017 MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH. Revision 2.0 (03/2017).
Alle Rechte vorbehalten. Die Siemens miniTek wird von der Sivantos GmbH unter der
Trademark-Lizenz der Siemens AG hergestellt.





MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH
Fürstenweg 77a | 6020 Innsbruck, Austria
vibrant@medel.com

medel.com

